


DÉTERGENT - DÉSINFECTANT  
DISPOSITIF MÉDICAL  
CLASSE IIb

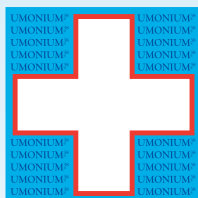

# UMONIUM<sup>38</sup>

## INSTRUMENTS



### ✓ FORMULE SANS

- COMPOSANT CMR\*\*
- PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

“ Le détergent - désinfectant  
non corrosif ”



UMONIUM<sup>38</sup> INSTRUMENTS opère un décollage des salissures organiques et procède à une décontamination de large spectre du matériel traité. Très rapide, cette solution de trempage éradique en un temps de contact réaliste, les souches les plus résistantes des germes hospitaliers. Ce produit d'excellence assure une désinfection ultra performante et garantit une instrumentation médicale et chirurgicale étincelante. Il n'émet aucune vapeur toxique et ne contient aucun perturbateur endocrinien, ... Sans danger de corrosion pour l'instrumentation.

\*\* Carcinogène, Mutagène ou Reprotoxique

 **laboratoire  
HUCKERT'S**  
INTERNATIONAL  
*la désinfection maîtrisée*





# UMONIUM<sup>38</sup> INSTRUMENTS

1L de concentré permet  
200L de solution diluée  
(0,5%).



✓ **FORMULE SANS**  
→ COMPOSANT CMR\*\*  
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

## INDICATIONS

Nettoyage et désinfection de dispositifs médicaux invasifs avant stérilisation.

## COMPOSITION

N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride/N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride. 99g/L.

## STANDARDS NORMATIFS

- Conforme à la DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (annexe II, excl. §4)
- Qualité et traçabilité garanties par ISO 9001:2015 et EN ISO 13485:2016

## MODE D'EMPLOI

**Nettoyage/Pré-désinfection:** Utiliser à 0,5% (25 mL/5L d'eau\*). Immerger. Brosset les dispositifs ou utiliser les ultrasons pour éliminer toute salissure. Rincer soigneusement à l'eau\*.

**Désinfection:** Utiliser à 2,5% (25 mL/L d'eau\*) sur dispositifs propres. Respecter un temps de trempage de minimum 10 minutes. Rincer soigneusement à l'eau\*.

UMONIUM<sup>38</sup> INSTRUMENTS ne remplace pas la procédure de stérilisation.


## PROPRIÉTÉS

- Dispositif médical Classe IIb
- Détergent - désinfectant à large spectre d'activité
- Non toxique, aucune vapeur dangereuse
- DL<sub>50</sub> (rat): 5840 mg/kg
- Non corrosif: pH neutre
- Produit dilué non irritant pour la peau (aucune toxicité transdermique)
- Sans aldéhyde, peroxyde, biguanide ou autre composant carcinogène, mutagène, reprotoxique
- Non coagulant
- Ininflammable
- Bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide
- 100% compatible sur fibre optique, caoutchouc, polycarbonate, composé acrylique, verre, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, néoprène, latex, silicone, peintures, acier inox 410
- Efficace, rapide et performant (dissout le sang)
- Efficace en présence de matières organiques
- Rapidité de désinfection: 10 min.
- Sans résidu après rinçage
- Stabilité: 36 mois date de fabrication

## PROCÉDURE D'UTILISATION

### ÉTAPE ① : NETTOYAGE/PRÉ-DÉSINFECTION

→ Un bain par utilisation

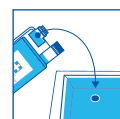

Utiliser à 0,5%  
(25 mL/5L d'eau\*)



Immerger, broser ou utiliser les ultrasons pour éliminer toute salissure



Rincer soigneusement à l'eau\*

### ÉTAPE ② : DÉSINFECTION

→ Utilisation du bain jusqu'à trouble visuel de celui-ci



Utiliser à 2,5%  
(25 mL/L d'eau\*)



Temps de trempage de minimum 10 minutes



Rincer soigneusement à l'eau\*

## DONNÉES TECHNIQUES

| Normes   | Organismes cibles                                                                                                                               | Temps de contact (min.) à 2,5% |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                 | Condition propre               | Condition sale |
| EN 13727 | <i>S. aureus</i><br><i>E. hirae</i><br><i>P. aeruginosa</i>                                                                                     | 1                              | 10             |
| EN 13697 | <i>S. aureus</i><br><i>E. hirae</i><br><i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><i>S. typhimurium</i><br><i>E. cloacae</i><br><i>L. Brevis</i> | 15                             | 15             |
| EN 14561 | <i>S. aureus</i><br><i>E. hirae</i><br><i>P. aeruginosa</i>                                                                                     | 15                             | 30             |
| EN 13624 | <i>C. albicans</i>                                                                                                                              | 10                             | 10             |
| EN 13697 | <i>C. albicans</i><br><i>A. niger</i>                                                                                                           | 15                             | 15             |
| EN 14562 | <i>C. albicans</i><br><i>A. niger</i>                                                                                                           | 10                             | 10             |
| EN 14476 | Norovirus<br>Adenovirus<br>Poliovirus                                                                                                           | 10                             | 10             |
|          | Vacciniavirus                                                                                                                                   | 5                              | -              |
| EN 14348 | <i>M. avium</i><br><i>M. terrae</i>                                                                                                             | 10                             | 10             |
| EN 14563 | <i>M. avium</i><br><i>M. terrae</i>                                                                                                             | 10                             | 10             |



| ARTICLE N°       | DÉSIGNATION                                 | CARTON       |
|------------------|---------------------------------------------|--------------|
| PF 12110         | Flacon doseur 1 litre                       | 12 x 1 litre |
| PF 12112         | Bidon de 5 litres avec pompe                | 4 x 5 litres |
| PF 12153         | Flacon doseur 125 mL                        | 24 x 125 mL  |
| EMB 0013         | Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 0,5 % | 1 pièce      |
| EMB 0013 - 2,5 % | Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 2,5 % | 1 pièce      |

\* Eau potable à température ambiante

\*\* Carcinogène, Mutagène ou Reprotoxique