


**INFECTIERISICO BEHEERSEN :
ONZE KNOWHOW SINDS 1957**

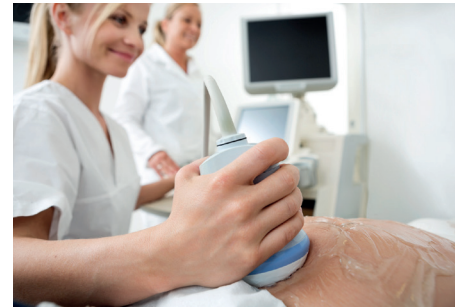


WIE ZIJN WIJ?

Het **familiebedrijf** Laboratoire Huckert's International ontwikkelt, produceert en verkoopt unieke hoogwaardige desinfectiemiddelen en cosmetica, die volledig veilig zijn voor al uw reinigings- en desinfectieprocessen.

Ons laboratorium ontleent zijn succes aan de kwaliteit en het technische karakter van onze producten, de dynamiek van de teams en een subtiele balans tussen **fijnchemie en de kracht van planten**.



WAAROM DESINFECTEREN?

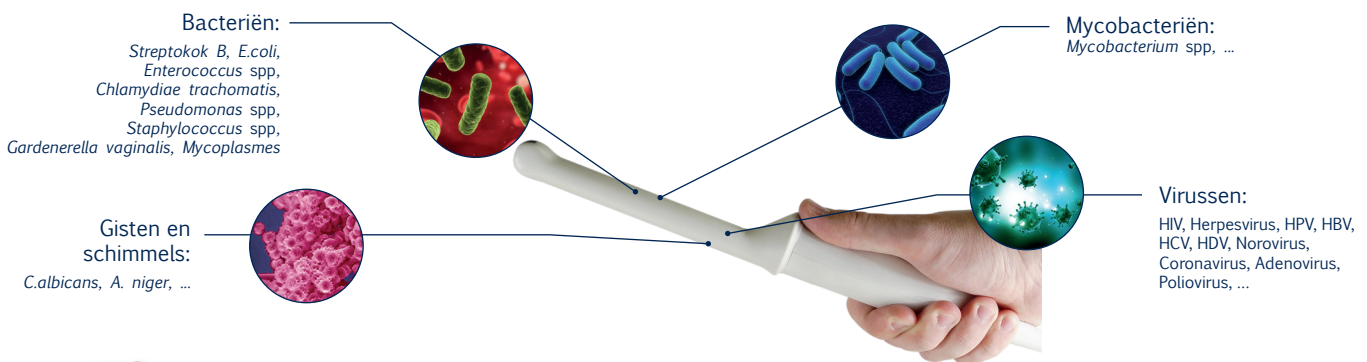

WAAROM DESINFECTEREN?

BIJ een ideale temperatuur en aanwezigheid van voedingsstoffen vermenigvuldigen micro-organismen zich om de 20 minuten. Zo kan een zeer kleine hoeveelheid ziektekiemen afkomstig van een besmette bron een schimmel-, virale of bacteriële kruisbesmetting veroorzaken en de bron van een infectie zijn.

Het is van essentieel belang om elk risico op besmetting uit te sluiten door voor elke interventie efficiënte en gecontroleerde was- en desinfectieprocedures uit te voeren. Alleen zorgvuldige controle kan deze professionele veiligheid garanderen.

WIST U DIT?

Een gevaarlijk product is geen garantie voor een hoogwaardig product: Europese normen stellen u in staat de doeltreffendheid van uw producten te beoordelen. De testomstandigheden moeten zo nauw mogelijk aansluiten bij de werkelijke gebruiksomstandigheden en verder gaan dan alleen efficiëntietests in suspensie (in vloeibare staat).

“Alleen wat schoon is, kan goed gedesinfecteerd worden”: alcohol, bleekmiddel, perazijnzuur, waterstofperoxide, bijtende soda en veel andere desinfectiemiddelen hebben geen reinigende eigenschappen. Het desinfectievermogen ervan wordt beïnvloed door de aanwezigheid van proteïneverontreiniging of andere storende stoffen en door de gebruikstemperatuur ervan.

ONZE MISSIE

Expert **ibiodecontaminatie** en **hoogwaardige desinfectie**. Onze missie is te zorgen voor een vlekkeloze desinfectie van de hele pathogene flora, zelfs bij interferentieomstandigheden (**bacteriën, gisten, schimmels, mycobacteriën, sporen, naakte en omhulde virussen**) zonder ongewenste bijwerkingen te veroorzaken.

“Vervang een biologisch gevaar niet door een chemisch gevaar”



**OPERATOR-
VRIENDELIJK**



**PATIËNT-
VRIENDELIJK**



**MATERIAAL-
VRIENDELIJK**



**MILIEU-
VRIENDELIJK**

Onze producten bevatten **geen CMR-stoffen of hormoonontregelaars** en vormen **geen risico op corrosie, brandwonden of giftige dampen**.

**pH-
neutraal**

✓ **FORMULE ZONDER**
→ CMR-STOFFEN
→ HORMOONONTREGELAARS

We streven er voortdurend naar om **onze biociden volgens dezelfde eisen als onze medische hulpmiddelen te produceren en te controleren**. Al onze biociden beantwoorden aan de **Europese Biocideverordening nr. 528/2012**.

ONZE INZET VOOR HET MILIEU

Duurzame ontwikkeling is een integraal onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van ons laboratorium.

We streven er vooral naar dat onze medewerkers **de waarden van ons familiebedrijf Kwaliteit, gezondheid, ethiek staan centraal in alles wat we doen**.

Van de niet-schadelijke aard van onze producten voor de OPMM (Operator, Patiënt, Materiaal, Milieu) tot vermindering van de milieu-impact als gevolg van onze activiteit.

Om milieurisico's te beheersen, volgen we **het pad van continue verbetering** want niets is voor altijd verworven. We **analyseren, evalueren, schatten en verbeteren de impact op het milieu**.



- ✓ **Geen lozing van stoffen die giftig of gevaarlijk zijn** voor het milieu in de stadia van het productieproces van onze producten.
- ✓ Milieuvriendelijk.
- ✓ Formules met **essentiële oliën** en geconcentreerde extracten van **geneeskrachtige planten**.
- ✓ “koude desinfectie” voor een **snelle en eenvoudige werking**.
- ✓ Gebruiksklare verstuivers **zonder drijfgas**.
- ✓ Een **breed scala** aan geconcentreerde producten.
- ✓ **PE green***-verpakkingen met een **negatieve ecologische voetafdruk**, en volledig **recyclebaar**.
- ✓ Een bijdrage voor de **verwerking van gerecycled afval**.
- ✓ Zuinige automatische **“ECONOMATIC”** meng- en **doseersystemen**.
- ✓ Consistente en traceerbare kwaliteit.

100%
RECYCLEERBARE
VERPAKKINGEN
VAN PLANTAAR-
DIG MATERIAAL*



RECYCLEERBARE
DOZEN, VERPAKKINGEN
EN DOEKJES. VERGEET
NIET UW AFVAL TE
SORTEREN!

* Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de grondstoffen.

INNOVATIE IN KOUDE DESINFECTIE



UMONIUM³⁸
master in disinfection



GEEN RESIDU'S
NA HET SPOLEN





* Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de grondstoffen.

EEN DESINFECTIEMIDDEL DAT OP ELKE BEHOEFTE IS AFGESTEMD

Er waren 38 pogingen nodig om een formule te verkrijgen die **prestatie, snelheid, stabiliteit en neutrale pH**.

De formule van UMONIUM³⁸ toont een aanzienlijk breder werkingsspectrum aan. De **contacttijd is kort en realistisch**. De **gebruikconcentraties zijn laag**. De tensioactieve aard van de formule zorgt zowel voor een **zeer krachtige**, hoogwaardige, reinigende, en desinfecterende werking als voor verwijdering van laagjes vet, eiwit of biofilm, door onderdompeling, stromingscirculatie, afvegen met een vochtig doekje, vaporiseren, schuimsprayen... Zowel koud als warm.

Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium

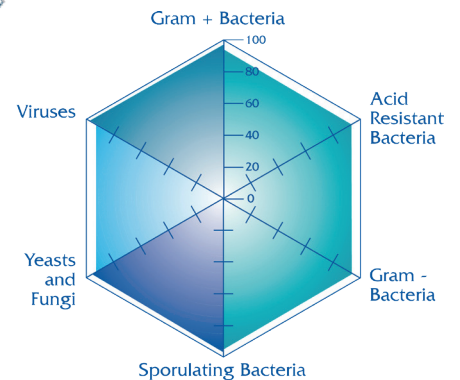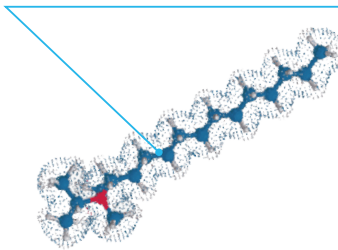

Niet giftig

Niet ontvlambaar

Zonder gevaarlijke dampen

WIJ BIEDEN HET ALTERNATIEF VOOR GEVAARLIJKE EN CORROSIEVE CHEMISCHE PRODUCTEN

pH-neutraal

✓ FORMULE ZONDER
 → CMR-STOFFEN
 → HORMOONONTREGELAARS

NIEUWE CERTIFICERING VOOR ONZE MEDISCHE HULPMIDDELEN





Laboratoire Huckert's International doorloopt momenteel de certificeringsprocedure voor de **MDR-verordening (EU) 2017/745** betreffende medische hulpmiddelen. Het betreft een uitgebreid productgamma ten opzichte van de richtlijn 93/42/EEG en bevat nieuwe classificatieregels. De belangrijkste verbeteringen van deze nieuwe verordening zijn:

- ✓ een versterkte conformiteitsbeoordeling (klinische beoordeling)
- ✓ een toename van de post-marketing follow-up
- ✓ betere traceerbaarheid van producten door de invoering van de codes "UDI" (unique device identifier)
- ✓ verbeterd risicobeheer
- ✓ verhoogde transparantie door de oprichting van het Europese "EUDAMED" platform

De conformiteit van dit **nieuwe kwaliteitsregelgevingssysteem** van Laboratoire Huckert's International is de garantie voor de kwaliteit van onze producten voor de behandeling van uw medische apparaten.

BEWEZEN EFFECTIVITEIT

KADERNORM EN 14885: 2022

SITUATIES & OMSTANDIGHEDEN IN HET LABORATORIUM	VERMINDERING BACTERIËN	VERMINDERING SCHIMMELS	VERMINDERING VIRUSSEN	VERMINDERING MYCOBACTERIËN	VERMINDERDE SPOREN	DESINFECTIE-PRESTATIE
SCREENINGTEST  FASE 1	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	PRESTATIE LAAG ★ Kunstmatige evaluatie
TEST IN SUSPENSIE  FASE 2 stap 1	99.999% 5 log EN 1276 EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> <i>E. coli</i>	99.990% 4 log EN 1650 EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99.990% 4 log EN 14476 EN 14476 <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus murin</i> <i>Vaccinia virus</i>	99.990% 4 log EN 14348 EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	3 log EN 13704 <i>Bacillus subtilis</i> 99.990% 4 log EN 17126 <i>Bacillus subtilis</i> & <i>Bacillus cereus</i> <i>Clostridioides difficile</i>	TUSSENLIJGGENDE PRESTATIE ★★ Beperkte validatie
TEST ONDER DROGE OMSTANDIGHEDEN  FASE 2 stap 2	99.990% 4 log EN 13697 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>E.coli</i> 99.999% 5 log EN 17387 EN 14561 EN 16615 <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i>	99.990% 4 log EN 13697 EN 17387 EN 14562 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i> EN 16615 <i>C. albicans</i>	99.990% 4 log N/A EN 16777 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> EN 17111 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> (<i>Panovirus</i> > 40° C)	99.990% 4 log N/A EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	99.990% 4 log EN 17846 <i>Clostridioides difficile</i>	HOGE KWALITEIT ★★ Validatie dicht bij de praktijk-omstandigheden
TEST ONDER PRAKTIJK-OMSTANDIGHEDEN  FASE 3	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	NIET TOEPASBAAR	ZEER HOGE PRESTATIE ★★ Validatie in praktijkomstandigheden

EN = Europese Norm

EN XXX = DM/Instrumenten

EN XXX = Biociden

EN XXX = Mechanische werking

NT = Niet Toepasbaar

WAAROM ONZE PRODUCTEN GEBRUIKEN?



UMONIUM³⁸
master in disinfection

ONZE DESINFECTERENDE OPLOSSINGEN AFKOMSTIG VAN DE FIJNCHEMIE



BREED SPECTRUM
BACTERICIDE, LEVURICIDE,
MYCOBACTERICIDE,
VIRICIDE & SPORICIDE



VEILIG
ZONDER CMR-STOFFEN
OF
HORMOONONTREGELAARS



ZONDER RESIDU'S
NA HET SPOELEN



REALISTISCHE
CONTACTTIJD



STABIEL



NIET
ONTVLAMBAAR



NIET CORROSIEF



ZONDER
GEVAARLIJKE DAMPEN



NIET VERVUILEND



OPPERVLAKTE-
ACTIEVE STOFFEN

ONZE DERMATOLOGISCHE OPLOSSINGEN AFKOMSTIG VAN MEDICINALE PLANTEN



NIET VERVUILEND



NIET-KLEVENDE
TEXTUUR



HYDROALCOHOLISCHE GELS
EFFICIËNT TEGEN MRSA
EN HET CORONAVIRUS



VEILIG
INGREDIËNTEN GESELECTEERD
UIT DE MEEST VEILIGE



FREQUENT
GEBRUIK



VOOR HET HELE
GEZIN



DERMATOLOGISCH
GETEST



100%
NATUURLIJKE GEUR




GEVOELIGE HUID



FORMULES MET
ESSENTIËLE OLIËN

IN DIENST VAN UW ACTIVITEITENSECTOR

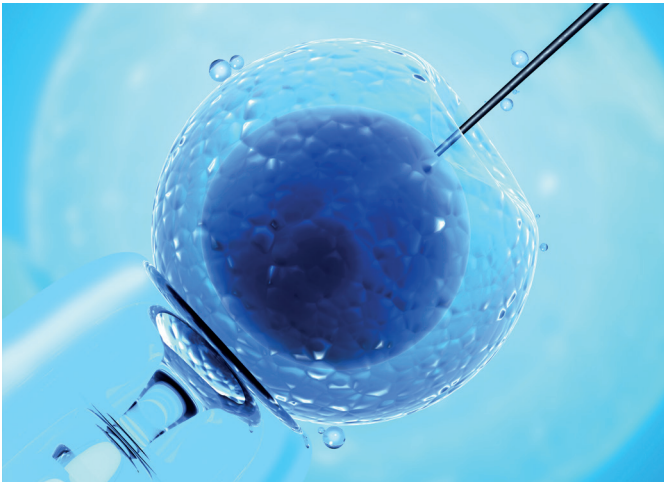

Van prik- en conserveringscentra tot laboratoria en zelfs binnen de klinische afdeling hebben IVF- en MBV-diensten te maken met zeer specifieke problemen. De standaard desinfectieproducten zijn niet geschikt en kunnen het succes van het protocol in de weg staan.

Het is absoluut noodzakelijk hoogwaardige producten te gebruiken die voldoen aan reproductietoxiciteitstesten om hun totale onschadelijkheid voor gameten aan te tonen, en om de In vitro stress die de ontwikkeling van het embryo kan beïnvloeden, zoveel mogelijk te verminderen.

UMONIUM^{38®} **NEUTRALIS** is nu het **enige gamma** op medisch hulpmiddelengebied dat voldoet **aan de hoogste efficiëntienormen** op alle pathogenen met validering van de referentietesten **MEA** (Mouse Embryo Assay) en **HSSA** (Human Sperm Survival Assay).

Het assortiment kan voor het hele traject tot aan de klinische unit worden gebruikt, zonder enig chemisch risico of interferentie. Het optimaliseert de kans van slagen van het protocol.



MBV-LABORATORIA



Vanwege het risico op besmetting en de gevoeligheid van de gameten en embryo's is het essentieel om perfect aangepaste producten in het laboratorium te gebruiken, die voldoen aan de hoogste prestatienormen voor alle pathogenen en de testen valideren op de afwezigheid van reproductietoxiciteit (MEA, HSSA).

De doeltreffendheid van veelgebruikte producten wordt helaas verkeerd gekarakteriseerd en verhoogt het risico op besmetting en protocolfouten (MBV, incubators, alle oppervlakken en apparatuur, ICSI-materiaal, cryo-preservedingmateriaal, Makler-cellen e.d.).

CECOS

Binnen de centra mogen gezondheidsveiligheid en reinigings- en desinfectieprocedures niet worden verwaarloosd. Verzamelen, cryo-conservering en transport moeten onder optimale omstandigheden gebeuren. Het gebruik van producten die niet giftig zijn voor gameten, embryo's of kieweefsel wordt sterk aanbevolen.

IN DIENST VAN UW ACTIVITEITENSECTOR

KLINISCHE EENHEID

Gedurende het hele klinische traject, ongeacht het type operatie (follikelpunctie, intra-uteriene inseminatie, terugplaatsing van het embryo...), is het absoluut noodzakelijk het infectierisico te beheersen. Het is ondenkbaar om standaardproducten te gebruiken en geen rekening te houden met de risico's van reproductietoxiciteit.

Alle oppervlakken en medische hulpmiddelen die rechtstreeks betrokken zijn bij de neonatale afdeling moeten strikt met geschikte producten op "medisch hulpmiddelniveau" gereinigd en gedesinfecteerd worden.

Deze producten mogen geen chemisch risico hebben, noch een bron van stress voor de gameten en het embryo zijn om de kans op falen te beperken (alle oppervlakken en uitrustingen van de operatiekamer, afzuigpomp, instrumenten, beeld- en echografiemateriaal...).

ECHOGRAFIE



Geleide of gecontroleerde echografie: het inbrengen van de echografie bij MBV wordt tegenwoordig in consensus genomen.

Er zijn nieuwe aanbevelingen gedaan voor het desinfecteren van endovaginale sondes, maar het gebruik van producten zoals chloordioxide of perazijnzuur is onverenigbaar met gevoelige ingrepen als MBV of verloskunde.

De **vochtige doekjes UMONIUM³⁸ PROBES** bieden een uitstekend alternatief, zijn vrij van CMR-stoffen en hormoonontregelaars en voldoen aan de hoogste prestatienormen voor alle pathogenen.

De onschadelijkheid ervan is gevalideerd, zelfs voor de embryonale omgeving en het protocol is zeer vereenvoudigd.

De apparatuurfabrikanten **ESAOTE**, **FUJIFILM healthcare/HITACHI diagnostic imaging**, **GE healthcare** en **SAMSUNG Medison** valideren de vochtige doekjes **UMONIUM³⁸ PROBES**.



GE Healthcare

esaote



FUJIFILM
FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG

ONZE OPLOSSINGEN VOOR UW BEROEP

1L = 200L
verdunde
oplossing



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS



Medisch Hulpmiddel Klasse IIb

500
sproeien
= 100 m²



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS SPRAY



Medisch Hulpmiddel Klasse IIb

1 doekje
= 3 m²



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS TISSUES



Medisch Hulpmiddel Klasse IIb

1 doekje
= 3 m²



UMONIUM³⁸
PROBES



Medisch Hulpmiddel Klasse IIb

VLOEREN, OPPERVLAKKEN EN APPARATEN

Het assortiment **UMONIUM³⁸ NEUTRALIS** wordt in het bijzonder aanbevolen voor risicovolle omgevingen en biedt geurloze producten voor medische hulpmiddelen met een hoge veiligheid (specifieke testen voor biotoxiciteit, de onschadelijkheid die **gevalideerd is tot in de embryonale omgeving**).

Het gaat hier om een **dubbele uitdaging, die van prestatie en onschadelijkheid**. Het valideert **zeer hoge prestatienormen** en **reageert op reprotoxiciteit- en embryotoxiciteitstesten**. Het wordt gebruikt voor de pre-desinfectie- en desinfectiefasen van alle oppervlakken, apparatuur en de meest gevoelige invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen.



Aanbevolen
ISO 5

SONDES

De **UMONIUM³⁸ PROBES** doekjes zijn speciaal ontwikkeld voor het desinfecteren van de endocavitare sondes (het geheel van echografische sondes en echografen) en semi-critische endoscopen zonder kanalen. Ze geven geen giftige dampen af en doden ziektekiemen in slechts 5 seconden.

FORMAAT EN CAPACITEIT

- ✓ Geconcentreerde oplossing verdunnen tot 0,5% of 2,5% om te weken of om met een vochtig doekje af te vegen.
- ✓ Met 1L concentraat wordt 200L verdunde oplossing verkregen (0,5%).


VERPAKKINGEN

25mL, 1L en 5L.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen
- ✓ Endovaginale sondes
- ✓ Apparaten
- ✓ Hoge en lage oppervlakken
- ✓ Laminaire stromingskappen
- ✓ Instrumenten

CONTACTTIJD

 10 minuten.

FORMAAT EN CAPACITEIT

- ✓ Gebruiksklare spray met dubbele sproeikop (fijne straal of schuim) om met een vochtig doekje af te vegen.
- ✓ 500 ml is goed voor een oppervlak van 100 m².


VERPAKKINGEN

500 ml.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Matrassen, BVK, incubators, stoelen, ...
- ✓ Beeldvormende apparaten
- ✓ Materiaal voor cryo-conservatie en transport
- ✓ Laminaire stromingskappen

CONTACTTIJD

 5 minuten.

FORMAAT EN CAPACITEIT

- ✓ Gebruiksklare vochtige doekjes.
- ✓ Een doekje (20 x 20 cm) is goed voor een oppervlak van 3 m².


VERPAKKINGEN

Zakje voor eenmalig gebruik en dispenserdoos met 100 doekjes (20 x 20 cm).

TOEPASSINGSVOORBEELDEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Alle oppervlakken, apparatuur en niet-invasieve medische hulpmiddelen (BVK, matrassen, incubators, ICSI-apparatuur...)

CONTACTTIJD

 5 seconden.

FORMAAT EN CAPACITEIT

- ✓ Gebruiksklare vochtige doekjes.
- ✓ Een doekje (20 x 20 cm) is goed voor een oppervlak van 3 m².


VERPAKKINGEN

Zakje voor eenmalig gebruik en dispenserdoos met 100 doekjes (20 x 20 cm).

TOEPASSINGSVOORBEELDEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Behandeling van endovaginale sondes voor gynaecologische controle en echografie
- ✓ Ultrasonde sondes

CONTACTTIJD

 5 seconden.


ONZE OPLOSSINGEN VOOR UW BEROEP



DROGE DOEKJES

100 droge doekjes om samen met ons gamma UMONIUM³⁸ **NEUTRALIS SPRAY** te gebruiken. **Hoogwaardige** doekjes voor eenmalig gebruik voor alle oppervlakken en medische hulpmiddelen

Onze doekjes zijn **ecologisch**, voor 90 % **biologisch afbreekbaar** na 45 dagen en voor 100 % na 76 dagen en **milieuvriendelijk**. Aanbevolen voor ISO 5 - 8 gecontroleerde omgevingen.

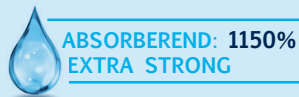

FORMAAT EN CAPACITEIT

- ✓ Gebruiksklare doekjes
- ✓ Dispenserdoos met 100 doekjes

SAMENSTELLING


- ✓ Houtpulp (51 %) en Viscose (49 %)

VERPAKKINGEN

Dispenserdoos met 100 doekjes (20 x 20 cm)

TOEPASSINGSVOORBEELDEN (REINIGING EN DESINFECTIE)

- ✓ Alle oppervlakken, apparatuur en niet-invasieve medische hulpmiddelen (BVK, matrassen, incubators, ICSI-apparatuur....)

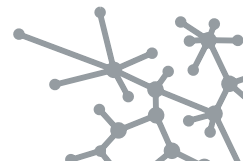

PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S
genesis



HYDROALCOHOLISCHE GEL

GEURLOZE FORMULE DIE VERRIJKT IS MET VERZACHTENDE WERKSTOFFEN

Herhaald gebruik van hydroalcoholische oplossingen veroorzaakt een diepe uitdroging van de hoornlaag. De huid verliest haar elasticiteit en de geringste trekkracht kan een scheur in het opperhuidweefsel veroorzaken. Het beheer van kruisbesmetting gebeurt als eerste door de handen te desinfecteren.

PHYTOGEL By HUCKERT'S[®] **genesis** is verrijkt met verzachtende, hydraterende en regenererende werkstoffen, hydrateert diepgaand en garandeert een hygiënische en chirurgische desinfectie.



VOOR WIE?

- ✓ Alle handen die gedesinfecteerd moeten worden



**HYGIËNISCHE
DESINFECTIE**

➔ Gevalideerd binnen **30 sec.**



**CHIRURGISCHE
DESINFECTIE**

➔ Gevalideerd binnen **3 min.**

VERPAKKINGEN

3 ml, 100 ml, 400 ml en 1L.

NAAM	FOTO(S)	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD
		PF 15515	Easydose 25 ml	2 x 50 stuks
		PF 12510	Doseerfles 1L	12 x 1L
		PF 12512	5L-fles met pomp	4 x 5L
		EMB 0013	Complete ECONOMATIC pompset - Dosering 0,5 %	1 stuk
		EMB 0013 - 2,5 %	Complete ECONOMATIC pompset - Dosering 2.5 %	1 stuk
		EMB 5101	Roestvrijstalen houder voor 5L	1 stuk
		PF 12608	Spuitfles 500 ml	20 x 500 ml
		EMB 0099	100 doekjes UMONIUM ³⁸ Wipes	12 stuks
		PF 10769	Doos met 100 coupons (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10779	500 individuele zakjes (20 x 20 cm)	500 x 1
		PF 10800	Doos met 100 doekjes (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 12800	Dispenser doos	2 x 50 stuks
		PF 20805	Zakfles 100 ml	28 x 100 ml
		PF 20810	Fles 400 ml	15 x 400 ml
		EMB 6075	3 ml-Easydose	500 x 3 ml
		EMB6100	Roestvrijstalen houder voor 400 ml-fles	1 stuk
		EMB 1253	Automatische wanddispenser	1 stuk
		EMB 1252	Handmatige wanddispenser	1 stuk
		PF 20822	Handmatige en automatische 1L-navuldispenser	11 x 1L



NIET GOED, GELD TERUG

De producten van Laboratoire Huckert's International bieden **garantie tegen ontevredenheid**.
Alleen een gepassioneerde fabrikant kan deze kwaliteit leveren.



BELGIUM

20 Avenue Lavoisier
1300 Wavre
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

FRANCE

91 rue Nationale
59000 Lille
Tel.: +33 (0)1 3976 1505

GD LUXEMBOURG

177 Rue du Luxembourg
L 8077 Bertrange
Tel.: +352 26 39 42 60

SWITZERLAND

9 Rue de la Grotte
1001 Lausanne
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

ITALY

20 Via Giulio Natta
05100 Terni
Tel.: +39 0744 80 03 87

SINGAPORE

9 Raffles Place,
#18-21 Republic Plaza II, Singapore 048619
Tel.: +65 983 45 333